



## FICHA TÉCNICA

Versão: 00  
Data: Setembro/2025

### Fraldas Descartáveis Abifral Classic Tamanho XG

#### DADOS DO PRODUTO

Código:	PA00016
Descrição:	Fraldas Descartáveis de uso Geriátrico Abifral Classic Tamanho XG
Cor da Embalagem:	Azul Marinho
Conteúdo:	7 unidades
Código de Barras GTIN-13:	0070341646199
Lote e Fabricação:	Impressos na embalagem
Dimensões da embalagem L x D x A (mm):	150 X 120 x 250
Validade:	03 anos a partir da data de fabricação, quando acondicionados em local adequado.
Peso Líquido da embalagem (g)	Aproximadamente 497,0

#### DADOS DO FABRICANTE

Razão Social:	Abifral Comercio e Industria LTDA
CNPJ:	49.928.561/0001-44
Endereço:	Rua das Arvores, 405, Bairro Distrito Olhos D'agua, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, cep: 33240-009
Responsável Técnica:	Dayana Reis Pereira, CRF/MG 35.525
Atendimento ao consumidor:	(31) 3025-3209

#### DADOS DE EMBARQUE

Unidade de Embarque:	Fardo com 12 embalagens com 7 unidades cada
Dimensões L X D X A (mm):	700 X 110 X 900
Peso Líquido (kg):	Aproximadamente 5,964

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto descartável para incontinência severa, com excelente poder de absorção, composto por camada de gel superabsorvente e fibras de celulose, cobertura interna de falso tecido, formato anatômico contendo elástico nas pernas, barreira antivazamento, cobertura externa permeável, fita tri laminada ultra adesiva nas laterais

e indicador de umidade. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, produto dermatologicamente testado.

Peso: acima de 90 kg

Tamanho da cintura: 120 cm à 165 cm

### **INDICAÇÃO DE USO**

Pós parto, geriátrico, incontinência e pós-operatório.

### **COMPOSIÇÃO:**

POLIETILENO, POLIPROPILENO COM ALOE VERA, POLIMERO DE ALTA ABSORÇÃO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, POLPA DE CELULOSE, FITA TRI LAMINADA E ELASTANO

### **MODO DE USO:**

#### **Com a pessoa em pé:**

Posicione a fralda entre as pernas, deixando a parte macia em contato com a pele. A extremidade com a fita adesiva deve ficar atrás.

Encaixe a parte central da fralda na virilha, estendendo a parte frontal sobre a barriga. Puxe com cuidado a parte traseira com as fitas adesivas sobre a parte da frente. Ajuste na cintura iniciando sempre com as fitas inferiores apontadas para o umbigo.

Ajustar na cintura iniciando pelas fitas inferiores direcionadas para o umbigo e as fitas superiores direcionadas para a virilha, de forma que fiquem bem ajustadas, sem aperto.

#### **Com a pessoa deitada:**

Com a pessoa de lado, posicione a fralda entre as pernas, deixando a parte macia em contato com a pele. As extremidades com as fitas adesivas devem ficar atrás.

Coloque a pessoa deitada de costas, ajuste a parte da frente e em seguida ajuste a parte de trás, puxando com cuidado para que fique sobre a parte da frente.

Ajuste na cintura iniciando a fixação com as fitas inferiores apontadas para o umbigo e as fitas superiores apontadas para a virilha, formando um V. Ajuste para que fique bem justo.

### **ASSUNTOS REGULATÓRIOS:**

Dispensado de registro do Ministério da Saúde, conforme portaria N° 1.480 de 31 de Dezembro de 1990, do Ministério da Saúde e RDC N° 142, de 17 de Março de 2017, do Ministério da saúde.

**RECOMENDAÇÕES:**

Manter em local seco, limpo, arejado, sem odor e ao abrigo do sol. Evite o contato das fitas adesivas com talco, óleo ou pomada para que não percam a aderência.

Produto para uso externo e descartável, não deve ser lavado ou reaproveitável, inutilizar após o uso. Em caso de irritação descontinuar o uso.

Manter o produto longe do alcance das crianças.

---

**Dayana Reis Pereira**

**Responsável Técnica CRF/MG 34525**